


Instrucciones de uso: Toallitas ReadyFlush®



Toallitas de limpieza individuales desechables

Limpieza después de cada episodio de incontinencia o uso para limpieza personal diaria de todas las partes del cuerpo según sea necesario.

- 1 Mantener las toallitas ReadyFlush al lado de la cama o cerca del baño.
- 2 Abrir el paquete como se indica, usar los dedos para encontrar la esquina de la toallita y tirar con cuidado para sacarla del paquete.
- 3 Limpiar todas las zonas afectadas. Al limpiar la región perineal, hacerlo de delante hacia atrás. Usar toallitas adicionales si fuera necesario.
- 4 Eliminar las toallitas ReadyFlush sucias a través del inodoro, bolsa de residuos o triturador. No formar bolas con las toallitas o intentar tirar de la cadena con mucha cantidad de toallitas.
- 5 Cierre el paquete después de su uso para mantener las toallitas húmedas.

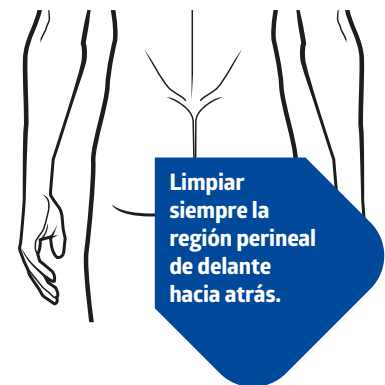

Para obtener más información sobre ReadyFlush, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite www.medline.eu/es