


Mode d'emploi : Lingettes ReadyFlush®



Lingettes nettoyantes solubles

Nettoient en douceur la peau après chaque épisode d'incontinence ou en utilisation quotidienne pour les soins corporels.

- 1 Conserver les lingettes ReadyFlush à proximité du lit ou près des sanitaires.
- 2 Ouvrir le paquet comme indiqué, attraper le bord de la lingette puis tirer dessus pour la sortir de l'emballage.
- 3 Nettoyer la zone corporelle. Lors du soin de la zone du périnée il est grandement recommandé de passer la lingette de l'avant vers arrière. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.
- 4 Jeter les lingettes usagées dans les toilettes. Eviter de tirer la chasse d'eau avec trop de lingettes en une seule fois.
- 5 Fermez l'emballage après utilisation pour maintenir l'humidité des lingettes.

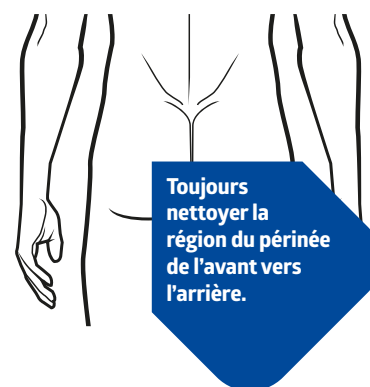

Pour plus d'informations concernant les lingettes ReadyFlush, contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site : www.medline.eu/fr