


Modo de utilização: Toalhetes ReadyFlush®



Toalhetes de higiene pessoal degradáveis

Para limpar após um episódio de incontinência ou para uso diário em higiene pessoal de todas as partes do corpo, conforme necessário.

- 1 Guarde os toalhetes ReadyFlush junto da mesa de cabeceira ou na casa de banho.
- 2 Abrir a embalagem conforme indicado, usar o dedo para localizar o rebordo do toalhete e puxar com cuidado para removê-lo da embalagem.
- 3 Limpar todas as zonas afetadas. Ao limpar a região perineal, limpar da frente para trás. Usar mais toalhetes se necessário.
- 4 Eliminar os toalhetes ReadyFlush sujos na sanita ou desintegrador. Não fazer uma bola com os toalhetes nem tentar eliminar uma grande quantidade dos mesmos na sanita.
- 5 Feche a embalagem para manter a umidade dos toalhetes.

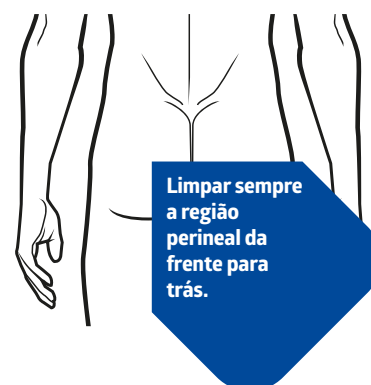

Para mais informações sobre as toalhetes ReadyFlush, contacte o gestor de conta Medline ou consulte: www.medline.eu/pt