

Lanceta de Segurança Medline

Uma solução para colheita de sangue capilar



**Segura e
fácil de usar**



Como usar a Lanceta de Segurança Medline



Funcionalidades

- Todas as agulhas são esterilizadas por raios gama e protegidas por uma tampa de esterilidade
- Caixa de agulha totalmente fechada, garantindo que a agulha fica escondida antes e depois do uso para evitar ferimentos por cortoperfurantes
- Mecanismo de autodestruição que impede a reutilização do dispositivo
- Agulhas revestidas a silicone e ultra-afiadas que se encontram na posição ideal durante a penetração da pele
- Produto com código por cores, para facilitar a identificação
- Fácil de manusear, de ativação intuitiva em apenas dois passos, sem pré-carga, tanto para ativações por botão como por contacto
- Tampa de segurança larga e comprida para uma remoção fácil; basta rodar e puxar para retirar a tampa da agulha

Microfluxo



SLN3016

Microfluxo



SLN2816

Fluxo normal



SLN2318

Fluxo normal



SLN2118

Fluxo alto



SLN1818

Pediátrico



SLBLADE12


Referência	Descrição	Agulha-Lâmina	Profundidade de penetração	Cor	Embalagem
SLN3016	Microfluxo	Agulha 30 G	1,6 mm	Verde claro	200 unid./caixa
SLN2816	Microfluxo	Agulha 28 G	1,6 mm	Azul claro	200 unid./caixa
SLN2318	Fluxo normal	Agulha 23 G	1,8 mm	Azul	200 unid./caixa
SLN2118	Fluxo normal	Agulha 21 G	1,8 mm	Verde	200 unid./caixa
SLN1818	Fluxo alto	Agulha 18 G	1,8 mm	Laranja	200 unid./caixa
SLBLADE12	Pediátrico	Lâmina	1,2 mm	Roxo	200 unid./caixa

Lanceta pediátrica para calcanhar Medline

Concebida com a precisão que é exigida

O nosso gatilho de fácil utilização aciona a lâmina de forma rápida, segura e precisa, garantindo que cada incisão seja feita com a profundidade e largura necessárias para um fluxo sanguíneo consistente

- Lâmina de aço inoxidável de alta qualidade
- Incisões pequenas e precisas que reduzem a formação de hematomas
- Tamanhos com código por cores, para facilitar a identificação
- Descartável, utilização única

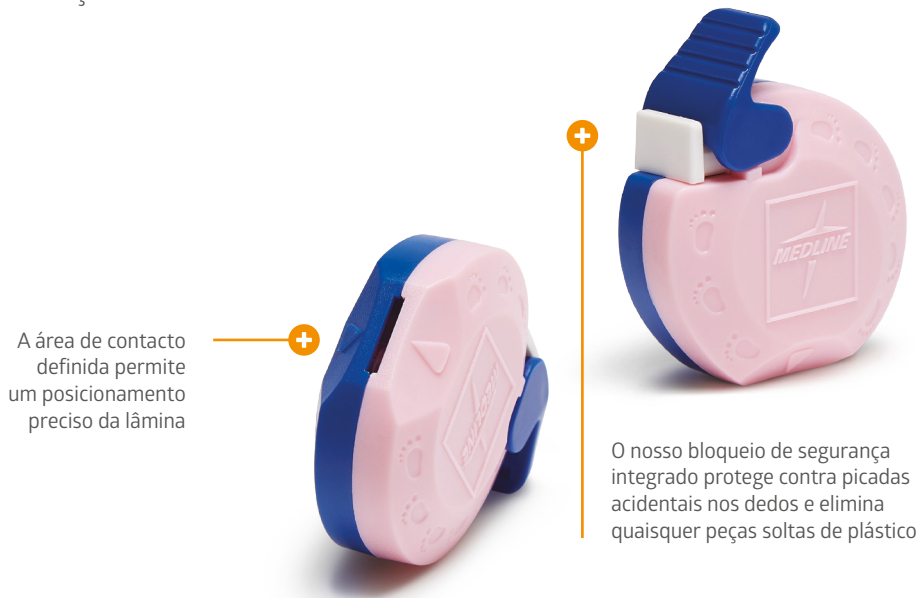

Micro-Premie (muito prematuro)

Referência	Descrição	Cor	Embalagem
BHL01	0,65 mm de profundidade, 1,4 mm de comprimento	Azul claro	200/caixa 50/embalagem



Premie (prematuro)

Referência	Descrição	Cor	Embalagem
BHL02	0,85 mm de profundidade, 1,75 mm de comprimento	Branco	200/caixa 50/embalagem



Newborn (recém-nascido)

Referência	Descrição	Cor	Embalagem
BHL03	1,0 mm de profundidade, 2,5 mm de comprimento	Rosa	200/caixa 50/embalagem



Toddler (bebê)

Referência	Descrição	Cor	Embalagem
BHL04	2,0 mm de profundidade, 3,0 mm de comprimento	Roxo	200/caixa 50/embalagem



Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito

1700-062 Lisboa

Portugal

Telemóvel: +351 800 110 253

www.medline.eu/pt

Encomendas: pt-pedidos@medline.com

Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2026 Medline. ML421_PT 04/2026