

# Anwendungshinweise für das Hautklammer- gerät von Medline



Die Hautklammergeräte von Medline stellen eine benutzerfreundliche Handhabung sicher und dienen dem Verschluss von Wunden bei vielfältigen chirurgischen Eingriffen.

Medline Hautklammergeräte:

- Verwenden ein System mit einer One-Shot-Klammersauslösung
- Enthalten 35 Klammern aus medizinischem Edelstahl
- Haben ein transparentes Fenster für eine präzise Positionierung und Sicht auf die verbleibenden Klammern
- Sorgen mit rechteckigen Klammern für einen stabilen und sauberen Wundverschluss
- Erhältlich in 2 unterschiedlichen Klammerdurchmessern



F-35WB



F-35RB

1



Adaptieren Sie die Wundränder miteinander. Platzieren Sie das Hautklammergerät an der Mittellinie der Wundränder. Halten Sie das Hautklammergerät **senkrecht**, sodass der Auslass **flach** auf der Hautoberfläche liegt.

2



Drücken Sie langsam und fest den Abzug bis zum Anschlag. Sie sollten dann ein "Klicken" hören. Dies zeigt an, dass die Hautklammer vollständig geschlossen ist. Wenn der Griff gedrückt wird, biegt ein Amboss die Hautklammer automatisch in die richtige Form.

3



Stellen Sie sicher, dass Sie den Abzug vollständig lösen, bevor Sie das Hautklammergerät von der Haut entfernen.

4



Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, bis die gesamte Wunde verschlossen ist.

Artikelnummer	Beschreibung		Verpackung	OP-Set Komponenten Nummer
F-35WB	Hautklammergerät mit 35 breiten Klammern Abmessungen der geschlossenen Klammern: 7,2 mm x 4,9 mm		5 Stück/Box 100 Stück/Karton	9080-EU
F-35RB	Hautklammergerät mit 35 normalen Klammern Abmessungen der geschlossenen Klammern: 5,9 mm x 3,9 mm		5 Stück/Box 100 Stück/Karton	9081-EU

Für weitere Informationen zu diesem Produkt oder wenn Sie eine Produktvorführung wünschen, können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)

Diese Produkte sind Medizinprodukte der Klasse IIa, die zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind. Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1346\_DE 03/2023



Shanghai International Holding Corp. GmbH  
Eiffelstraße 80  
20537 Hamburg