

# Comment utiliser l'agrafeuse Medline



Les agrafeuses Medline sont une solution intuitive fiable et polyvalente de fermeture des plaies.

Caractéristiques :

- Système coup par coup
- 35 agrafes en acier inoxydable à usage médical
- Fenêtre transparente pour un positionnement précis et une vue dégagée sur les agrafes restantes
- Forme rectangulaire pour garantir la stabilité de la fermeture des plaies
- Disponibles en 2 tailles d'agrafes.



1



Approchez les berges de la plaie jusqu'à ce qu'elles soient incurvées vers l'extérieur. Positionnez l'agrafeuse chirurgicale sur la ligne médiane de la plaie. Tenez-la à la verticale en plaçant la sortie des agrafes à plat sur la peau.

2



Appuyer lentement et fermement sur la poignée jusqu'à entendre un "clic" audible. Cela indique que l'agrafe est complètement fermée. Lorsque vous actionnez la poignée, une enclume replie automatiquement l'agrafe pour obtenir la configuration désirée.

3



Veillez à relâcher complètement la poignée avant de retirer l'agrafeuse de la peau.

4



Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que l'intégralité de la plaie soit fermée.

Référence	Description		Conditionnement	Numéro du composant de l'emballage
F-35WB	Agrafeuse avec 35 agrafes larges Dimensions de l'agrafe après fermeture : 7,2 x 4,9 mm		5/boîte, 100/carton	9080-EU
F-35RB	Agrafeuse avec 35 agrafes standard Dimensions de l'agrafe après fermeture : 5,9 x 3,9 mm		5/boîte, 100/carton	9081-EU

Pour plus d'informations sur ce produit, merci de contacter votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe IIa destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, consulter et respecter les instructions et les précautions d'emploi sur l'étiquette correspondante.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1346\_FR 03/2023



Shanghai International Holding Corp. GmbH  
Eiffelstraße 80  
20537 Hamburg, Allemagne