

Fundas estériles para sondas de ecógrafo SonoGuard

Ahorre tiempo y reduzca los ruidos con una imagen sin restricciones



**Sistema de
barrera estéril
para fundas
de ecógrafo**

Ahorro de tiempo, menos residuos y mayor visibilidad

Las fundas estériles para sonda de ecógrafo SonoGuard Plus vienen con un film adhesivo ClearView para fijar el cabezal del transductor de ultrasonido al interior de la funda. El uso de gel de contacto en el interior de esta funda es innecesario, eliminando un paso adicional de preparación. Y gracias a las propiedades antideslizantes de la funda, el uso de una segunda banda de goma o una tira adhesiva para la fijación adicional es simplemente opcional.

Tras su uso, la funda y el film adhesivo pueden retirarse de la sonda sin dejar residuos. No es necesario limpiar el exceso de gel de contacto de la sonda y el cable.



El tiempo necesario para preparar el transductor para los procedimientos se reduce, ya que la funda se fija y despliega fácilmente gracias al film adhesivo ClearView.




El tiempo necesario para limpiar el transductor después del procedimiento se reduce, ya que esta funda no requiere gel.



Consiga una mejor calidad de imagen que con una funda de sonda de ultrasonidos tradicional, gracias a la "tecnología sin burbujas".



Funda de ecógrafo tradicional

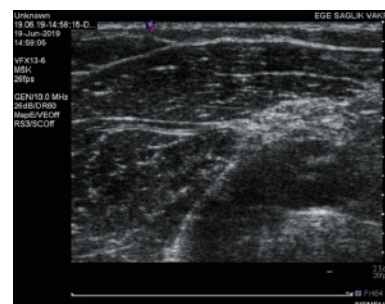

Funda de ecógrafo SonoGuard

Aplicación



Paso 1:

Introduzca una mano en la cavidad más interna (la más sobresaliente) y, a continuación, separe los dedos para evitar la formación de arrugas en la superficie adhesiva.



Paso 2:

Con la otra mano, retire el papel protector de la superficie adhesiva.



Paso 3:

El transductor debe colocarse entonces sobre el adhesivo. Asegúrese de que el adhesivo está liso usando la mano dentro de la funda. Una vez colocado, sujete el transductor con la mano aún dentro de la funda.



Paso 4:

Para enfundar el transductor, gire la funda plegada del revés tirando de la solapa (etiqueta 1) con la mano exterior mientras sigue sujetando el transductor con firmeza.



Paso 5:

La funda puede extenderse sobre el cable tirando hacia arriba (etiqueta 2) sin tocar el extremo proximal de la funda.



Paso 6:

Para eliminar el aire atrapado o las arrugas restantes entre la superficie adhesiva ClearView y la cara del transductor, la persona estéril debe pasar el dedo por la zona afectada.



Paso 7:

Mantenga la funda en su lugar aplicando una de las tiras adhesivas o gomas elásticas suministradas alrededor del transductor.

Paso 8 (opcional):

Utilizando la segunda tira adhesiva o banda elástica suministrada, la funda que queda suelta se puede ajustar al cable detrás del transductor para mejorar el manejo durante su uso.

Especificaciones

- Fabricada con film de polietileno libre de látex y libre de ftalatos
- Incluye un film adhesivo conductor para colocar la sonda y retirarla sin dejar residuos
- Plegado telescópico
- Incluye tiras de cinta adhesiva y bandas elásticas para su fijación
- Longitudes disponibles: 40 cm, 80 cm, 120 cm y 160 cm
- Ancho: 18 cm
- Cada kit individual estéril envasado en una bolsa tipo solapa

Información sobre pedidos

SonoGuard Plus

Referencia	Dimensiones	Envasado
US.20.180.040	18 x 40 cm	200 unidades/envase; 100 unidades/caja
US.20.180.080	18 x 80 cm	200 unidades/envase; 100 unidades/caja
US.20.180.120	18 x 120 cm	200 unidades/envase; 100 unidades/caja
US.20.180.160	18 x 160 cm	200 unidades/envase; 100 unidades/caja

Kits SonoGuard Plus con gel

Referencia	Dimensiones	Envasado
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	200 unidades/envase; 50 unidades/caja
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	200 unidades/envase; 50 unidades/caja
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	200 unidades/envase; 50 unidades/caja
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	200 unidades/envase; 50 unidades/caja

Para más información sobre nuestros productos, contacte con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es






Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

Estos productos son productos sanitarios de clase I estéril para el uso por profesionales sanitarios.

Kits sin gel:  Promecon GmbH
Kreuzerstraße 10
20095 Hamburg, Germany  0537

Kits con gel: Accesorio para packs: Art. 12 de la Directiva 93/42/CEE.  Probe cover:
Promecon GmbH
Kreuzerstraße 10
20095 Hamburg, Germany   Get:
Turkuaz Medikal
Akcaburgaz, Mahsin Yazıcıoğlu Cd. No:45/5
34522 Esenyurt/Istanbul, Turkey  2292

 Fabricante del equipo para procedimientos:
Promecon GmbH
Kreuzerstraße 10
20095 Hamburg, Germany

Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2021 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1131_ES 09/2021