

SonoGuard Plus Steriele Echosonde Beschermers

Bespaar tijd en verminder afval met een onbeperkt echobeeld



**Steriele barrière
voor echografie
sondebeschermers**

Tijdwinst, minder afval en beter zicht

SonoGuard Plus steriele echografie sondebeschermers worden geleverd met zelfklevende ClearView-folie om de kop van de ultrasonische transducer aan de binnenkant van de beschermer te bevestigen. Het gebruik van contactgel aan de binnenkant van deze beschermer is niet nodig, wat een extra stap scheelt bij het klaarzetten. En vanwege de antislip eigenschappen van de beschermer is het gebruik van een tweede elastiek of plakstrip voor extra bevestiging slechts optioneel.

Na gebruik kunnen de beschermer en het plakfolie van de sonde worden verwijderd zonder dat er residu achterblijft. Het is niet nodig om overtollige contactgel van de sonde en kabel af te poetsen!



Verkort de tijd die nodig is om de transducer voor te bereiden op procedures, omdat de beschermer dankzij de ClearView kleeflaag eenvoudig kan worden bevestigd en uitgevouwen.




Verminder de tijd die nodig is om de transducer na de procedure te reinigen, omdat bij deze beschermer geen gel nodig is.



Behaal een betere beeldkwaliteit dan met een traditionele ultrasonische sondebeschermer, dankzij de 'no-bubble technologie'.



Traditionele beschermer voor echografiesondes

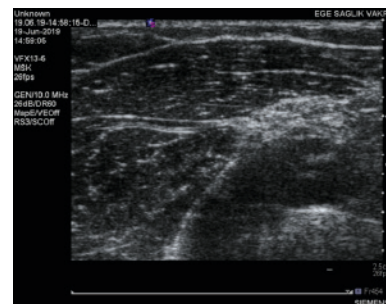

SonoGuard Plus ultrasonische sondebeschermer

Toepassing



Stap 1:

Steek een hand in de binnenste opening (meest uitstekende) en spreid vervolgens uw vingers om rimpels op het kleefoppervlak te voorkomen.



Stap 2:

Verwijder met uw andere hand het beschermende papier van het zelfklevende oppervlak.



Stap 3:

De transducer moet dan op de kleeflaag worden geplaatst. Zorg ervoor dat de kleeflaag glad is met de hand aan de binnenkant van de beschermer. Eenmaal aangebracht, pakt u de transducer vast met de hand nog steeds in de beschermer.



Stap 4:

Om de transducer te omhullen, draait u de gevouwen beschermer binnenstebuiten door met de buitenhand aan de flap (label 1) te trekken terwijl u de transducer stevig vasthoudt.



Stap 5:

De hoes kan over de kabel worden verlengd door aan de omslag (label 2) te trekken zonder het proximale uiteinde van de hoes aan te raken.



Stap 6:

Om eventuele luchtbellens of resterende rimpels tussen het ClearView-plakoppervlak en het oppervlak van de transducer te verwijderen, moet de steriele persoon met zijn / haar vinger over deze plekken wrijven.



Stap 7:

Houd de hoes stevig op zijn plaats door een van de meegeleverde plakstrips of elastiekjes rond de transducer aan te brengen.

Stap 8 (optioneel):

Met behulp van de tweede bijgeleverde plakstrip of elastiek kan de losjes passende beschermer aan de kabel achter de transducer worden vastgemaakt voor eenvoudiger gebruik.

Specificaties

- Gemaakt van polyethyleenfolie die latex- en ftalaatvrij is
- Inclusief geleidende zelfklevende folie om de sonde te plaatsen en zonder resten te verwijderen
- Telescopisch gevouwen
- Bevat stroken plakband en elastieken voor bevestiging
- Beschikbare lengtes: 40 cm, 80 cm, 120 cm en 160 cm
- Breedte: 18 cm
- Elke afzonderlijke steriele set is verpakt in een laminaatzakje

Bestelgegevens

SonoGuard Plus

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
US.20.180.040	18 x 40 cm	200 st/omdoos, 100 st/doos
US.20.180.080	18 x 80 cm	200 st/omdoos, 100 st/doos
US.20.180.120	18 x 120 cm	200 st/omdoos, 100 st/doos
US.20.180.160	18 x 160 cm	200 st/omdoos, 100 st/doos

SonoGuard Plus sets met gel

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	200 st/omdoos, 50 st/doos
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	200 st/omdoos, 50 st/doos
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	200 st/omdoos, 50 st/doos
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	200 st/omdoos, 50 st/doos

Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze website bezoeken: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Deze producten zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

Sets zonder gel:  Promecon GmbH
Kreuzerstraße 10
20095 Hamburg, Germany  0537

Sets met gel: Procedureset acc. Art. 12 MDD 93/42/EEC.  Promecon GmbH
Kreuzerstraße 10
20095 Hamburg, Germany   Turkuaz Medikal
Akcaburgaz, Muhsin Yazicioglu Cd. No:45/5
34522 Esenyurt/Istanbul, Turkey  2292

 PPP  Promecon GmbH
Kreuzerstraße 10
20095 Hamburg, Germany

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2021 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1131_NL 09/2021