




**CENTURION**  
MEDICAL PRODUCTS

**SorbaView® 2000**

Transparante Infuuspleister

**Ontworpen  
om gemakkelijk  
aan te brengen  
en langer mee  
te gaan**

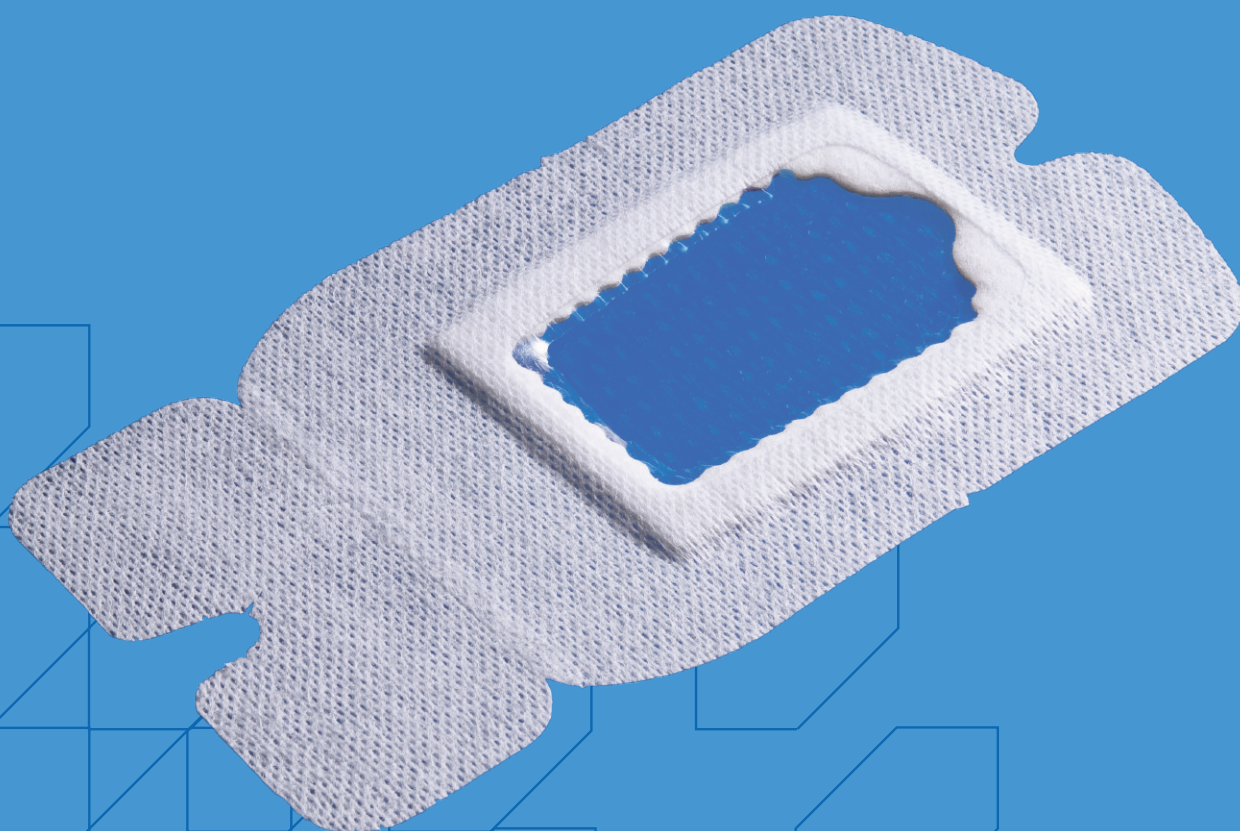

## Voordelen voor zorgverleners, ziekenhuizen en patiënten


- Een geïntegreerd absorptieverband voert vocht af en houdt de huid droog
- Blijft langdurig stevig zitten om aan ziekenhuisbeleid te voldoen (tot 7 dagen voor centrale lijnen en tot 96 uur of tot klinisch aangegeven voor perifere katheters)
- Past zich aan de lichaamscontouren aan
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Uitzonderlijk hoge waterdamptransmissiesnelheid (WVTR)
- De plaklaag irriteert niet, maakt de huid niet gevoelig en is niet cytotoxisch
- De insteekopening is continu zichtbaar dankzij het transparante venster
- De meerlaagse constructie is beschermend, ademend en comfortabel om te dragen
- Vormt een occlusieve barrière tegen bacteriën, virussen en andere verontreinigingen, maar niet tegen waterdamp of andere normale gassen
- Bevat geen natuurrubberlatex



Subclavia (SV40XT)



Perifere (SV30XT)

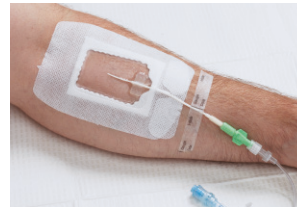


PICC (SV48VXT)



Geïmplanteerde poort (SV55XT)

## SorbaView 2000 beschikbare formaten


SV30XT  
zonder sluitingsstuk

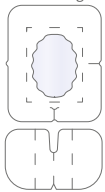


SV30VST  
inclusief sluitingsstuk




SV30NVST

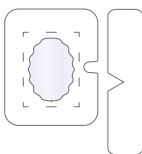


SV30NXT3

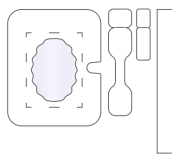


SV30NXT

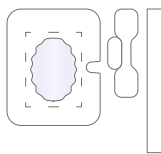

SV40XT

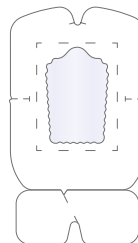


SV46XT  
zonder sluitingsstuk

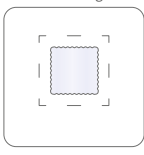

SV46VST  
inclusief sluitingsstuk




SV48VXT  
zonder plakstrip

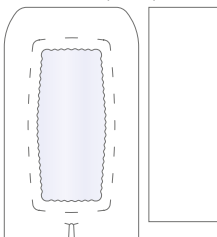


SV48NFST  
inclusief plakstrip



SV55XT

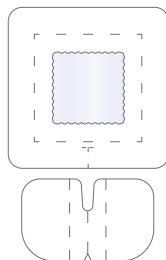

SV80XT  
zonder plakstrip

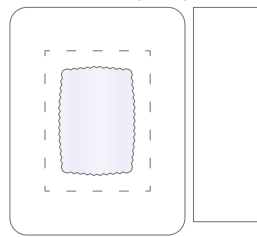

SV80FST  
inclusief plakstrip



De SorbaView 2000 Transparante Infuuspleister zet de standaard voor uitzonderlijk katheterbeheer en -fixatie.

SorbaView is eenvoudig aan te brengen en blijft tot zeven dagen intact bij centrale lijnen. Dit vermindert het aantal verbandwissels en vermindert zo het risico op infecties.<sup>1,2</sup>

Met SorbaView kan de huid ademen en is er een bewezen barrière tegen externe vloeistoffen en bacteriën.

Dankzij het kenmerkende ontwerp kunnen dampen door het folie ontsnappen terwijl het absorberende verband overtollig vocht opneemt. Dit voorkomt het opbouwen van vocht rond de insteekopening en voorkomt dat vocht de plaklaag onder de stoffen rand afbreekt. De plaklaag blijft droog, de pleister blijft zitten!



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Een uitgebreid assortiment van Centurion katheterfixatie producten zijn verkrijgbaar voor nog betere stabilisatie en bescherming.

<sup>1</sup>Lee, M. Seven Day Dwell Times for Vascular Access Device Exit Site Dressings, Lee Medical Inc. 2005. <sup>2</sup>Garcia, R et al. Three Years Experience in Implementing HICPAC Recommendations for the Reduction of Central Venous Catheter-Related Bloodstream Infections. Brookdale University Medical Center (BUMC), 2003.

De SorbaView 2000 Transparante Infuuspleister zijn medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML943\_NL 06/2022

© 2022 Centurion Medical Products Corporation LIT063V3E



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

