

Zuverlässiger Halt. Anhaltende Reinheit.

So bleiben Katheter steril und fixiert.

Die sterilen Fixierverbände Suresite® Select verbessern den Komfort des Patienten und erleichtern die Arbeit des Pflegepersonals. Die Fixierverbände dichten vollständig ab, halten den Katheter fest an seinem Platz und tragen dazu bei, das Eindringen schädlicher Mikroorganismen zu verhindern. Das außergewöhnlich breite Sichtfenster von Suresite® Select erleichtert zudem die Überwachung auf Anzeichen einer Infektion.


Schutz, auf den Sie sich verlassen können

Suresite® gewährleistet einen festen, bequemen Sitz an jedem Applikationsort.

- Periphere und zentrale Venenkatheter
- Zentrale Venenkatheter (ZVK)
- Peripher eingeführte zentralvenöse Katheter (PICC-Katheter)
- Getunnelte ZVKs
- Portsysteme und Portkatheter
- Arterielle Katheter
- Dialysekatheter

Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
VAD1680-INT	4,4 x 3,8 cm	400/Karton, 100/Tüte
VAD1682-INT	5,7 x 5,1 cm	400/Karton, 100/Tüte
VAD1882-INT	7 x 8,9 cm	200/Karton, 50/Tüte
VAD1683-INT	7 x 7,3 cm	400/Karton, 100/Tüte
VAD1685-INT	8,9 x 11,4 cm	200/Karton, 50/Tüte
VAD1688-INT	10,2 x 11,4 cm	200/Karton, 50/Tüte
VAD1689-INT	10,2 x 15,5 cm	100/Karton, 25/Tüte

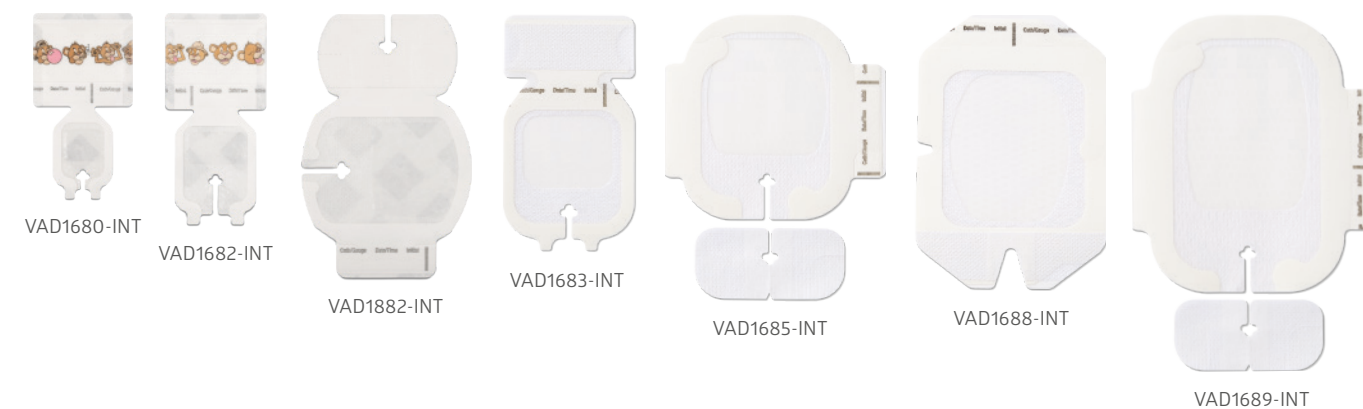

Sorgen Sie für sicheren Halt. Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Suresite® Select Fixierverbände sind sterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Anwendung durch Angehörige der medizinischen Fachkreise bestimmt. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung.

Centurion Medical Products Corporation
100 Centurion Way
Williamstown, MA 01890, USA  Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
94110 Charente-le-Pont, France  2797 (BSI, Niederlande)

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.


© 2021 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1045_DE 06/2021.

Suresite® Select Fixierverbände

Für Kathetersicherheit und Patientenkomfort



**Schutz auf
den Sie
zählen
können**

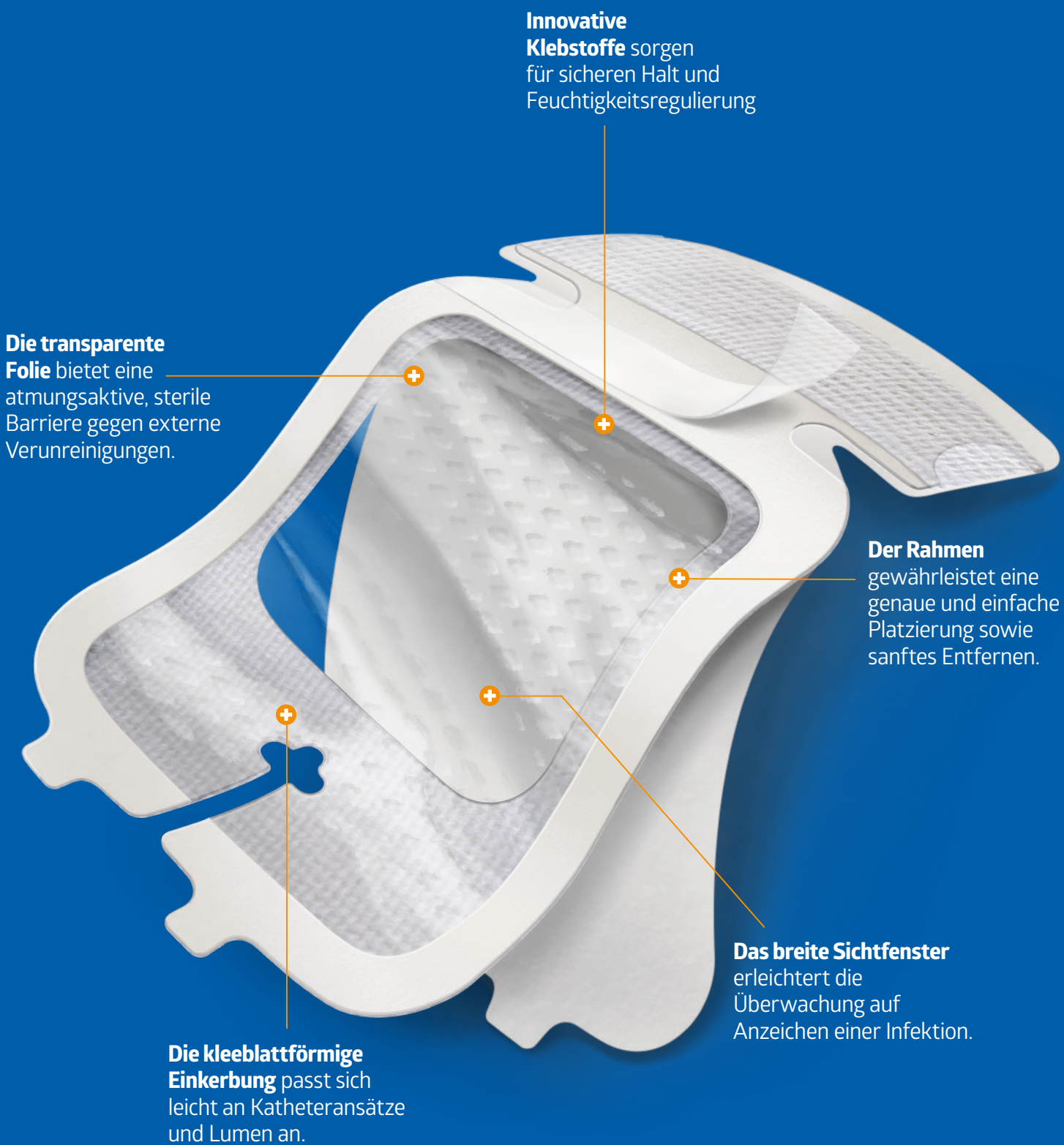

Anwendung

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Fixierverband, um die Klebefläche freizulegen.
2. Positionieren Sie die Ränder des Sichtfensters über dem Katheteransatz.
3. Ziehen Sie die Außenränder ab und üben Sie dabei Druck auf die Randkanten aus.
4. Bringen Sie ein Klebeband unter dem Sichtfenster und über dem geformten Katheteransatz an.



VAD1683-INT 7,0 x 7,3 cm



VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm



Entfernung

1. Entfernen Sie alle Schutzklebestreifen vom Fixierverband.
2. Halten Sie den Fixierverband vorsichtig an den Stoffkanten unter der Einkerbung fest.
3. Heben Sie den Fixierverband auf beiden Seiten langsam von unten an.
4. Ziehen Sie den Fixierverband vollständig in Richtung der Einstichstelle der Kanüle ab.



VAD1683-INT 7,0 x 7,3 cm



VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm

