



# Kirurgisk klipper

Designet til sikkerhed, komfort og bekvemmelighed

## Fordele

- Bevare hudens integritet.
- Antiglid sidegreb for en bedre kontrol og énhåndsbetjening.
- Nem at montere og fjerne.
- Nikkel-metalhydrid batteri for længere kontinuerlig ydelse.

Reference	Beskrivelse	Farve	Antal
DYND70800EU	Klipper og oplader	Hvid	1
DYND70801EU	Klipper	Hvid	1
DYND70802EU	Oplader	Hvid	1
DYND70880E	Universal blad	Grå	50/ks
DYND70885E	Neuro blad	Blå	50/ks
DYND70890E	Intim blad	Rød	50/ks




## En klipper model dækker alle dine behov!



### 1 Påsætning af blad

- Tilpas mærket på bladet med det på klipperen
- Lad bladet glide frem til det passer med mærket på klipperen
- Et « klik » høres

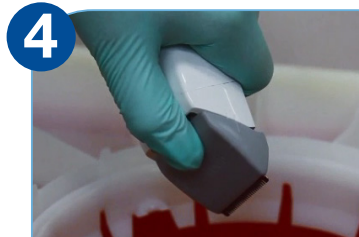

### 4 Fjernelse af blad

- Sæt den på « OFF » position
- Sæt tommelfingeren på fordybning på blad
- Tryk til bladet falder af



### 2 Greb

- Korrekt anvendelse, hold klipperen som en pen
- Antiglid håndtag giver fuld kontrol over klipperen og gør énhåndsbetjening mulig



### 5 Rengøring og desinfektion

- Rens under rindende vand
- Tør af med desinfektions klud, ikke korroderende midler



### 3 Klipper både våd og tør hud

- Sæt den på « ON » position
- Brug korte strøg for at fjerne hår
- Bedste resultat opnås ved at klippe mod vækstretning



### 6 Opbevaring

- Sæt klipperen på « OFF » position
- Placér i ladestationen

\* Disse produkter er medicinsk udstyr i klasse I, der er fremstillet af Medline Industries Inc. for enhver information henvises til IFU og emballage.

CE 0086

EC REP

Medline International France SAS,  
5 rue Charles Lindbergh,  
44110 Châteaubriant, France



Medline Denmark ApS  
No 5 Booths Park  
Chelford Road  
Knutsford - Cheshire  
WA16 8GS - United Kingdom

tel. 89 88 27 37  
fax. 89 88 27 38  
www.medline.com/en