



VERHINDERN SIE

KREUZ-KONTAMINATIONEN.

Tourniquets für den Einmalgebrauch

Einmal-Venenstauer

TOURNIQUETS FÜR DEN EINMALGEBRAUCH

Wiederverwendbare Tourniquets stellen ein potenzielles Kontaminierungsrisiko für Patienten und Ärzte dar und begünstigen die Verbreitung von schweren Infektionen, wie zum Beispiel MRSA. Die blauen Venenstauer / Tourniquets von Medline sind für den Einmalgebrauch bzw. für die kurzzeitige Verwendung an ein und demselben Patienten bestimmt. Sie werden bei der venösen Blutentnahme oder beim Legen intravenöser Kanülen verwendet.

Neben den oben genannten Gründen und der Infektionsprävention bieten unsere Tourniquets folgende Vorteile:

- » Einmalprodukt
- » Kosteneffizienz, Qualität und Anwenderfreundlichkeit
- » Latexfreies Material
- » Kein Verrutschen dank griffiger Oberflächenstruktur

Gebrauchsanweisung



1. Legen Sie das blaue Tourniquet um den Arm, dehnen und überkreuzen Sie es.
2. Halten Sie das eine Ende straff, während Sie das andere Ende in einer Schlaufe darunter ziehen.
3. Das Tourniquet bildet eine Schlaufe. Bitte beachten Sie, dass beide Enden auf derselben Seite liegen und verknoten Sie die Enden nicht.
4. Der gewünschte Bereich wird nun mit Hilfe des Tourniquets gestaut.
5. Lösen Sie das Tourniquet, indem Sie an dem Ende der Schlaufe ziehen (siehe Foto).
Anschließend entsorgen Sie das Tourniquet vorschriftsmäßig.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
DYNDE75020A	Einweg-Tourniquet	2,5 x 45,7 cm	100 Stück / Karton
DYNDE75025	Einweg-Tourniquet	2,5 x 55 cm	25 Stück / Karton



Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Außendienstmitarbeiter oder besuchen Sie uns unter www.medline.eu/de



**ALWAYS
ON.**

Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rölle
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

MDD Klasse: I nicht steril gemäß 93/42/EWG

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2019 Medline ist eine eingetragene Marke der Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML535-DE 07/2019.

EC REP Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant
France