


Guide de l'utilisateur

Système de mesure de la diurèse horaire avec poche d'échange UROSID® M5


ASID  BONZ
A MEDLINE COMPANY




Préparation

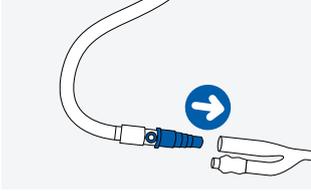


- Vérifiez que la sonde urinaire reste stérile.
- Après avoir retiré le capuchon, raccordez le connecteur étagé universel à la sonde urinaire.

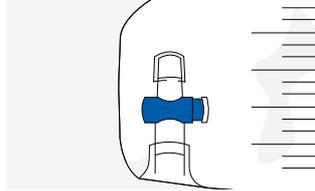

- Vérifiez que la valve de drainage est fermée et correctement installée.

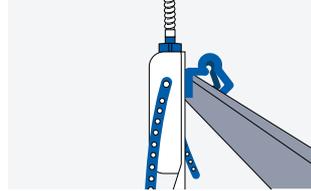


- Utilisez le support de lit pour fixer le dispositif à la verticale, au pied du lit.


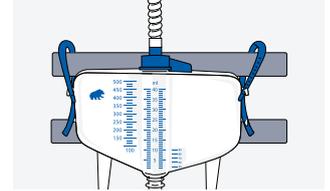


- Utilisez les sangles en plastique et la ficelle pour plus de sécurité.

Installation et positionnement corrects

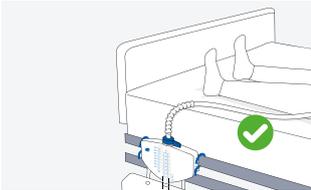


- Vérifiez que le dispositif reste à la verticale, au pied du lit du patient, et que la tubulure ne se tord pas ou ne forme pas de boucle.

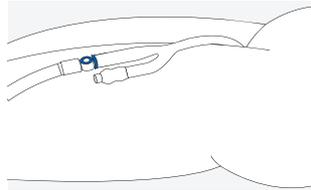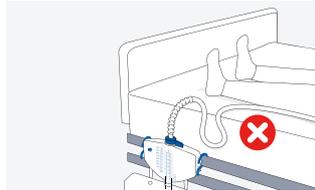


- Le port de prélèvement sans aiguille doit être à plat et la sonde urinaire placée en travers de la cuisse du patient.


Surveillance de la diurèse

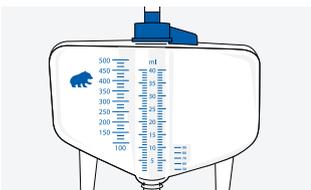


- À l'aide des graduations faciles à lire situées sur la chambre de l'UROSID M5, notez la diurèse du patient.

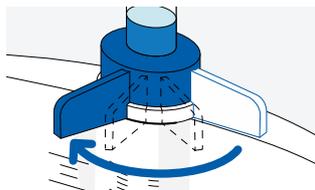

- Ouvrez à fond la vanne bleu foncé en haut de la chambre, tel qu'indiqué, pour permettre à l'urine de s'écouler dans la poche d'échange.

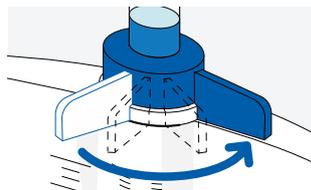


- Fermez à fond la vanne bleu foncé, une fois que la chambre est vide pour poursuivre la surveillance de la diurèse.

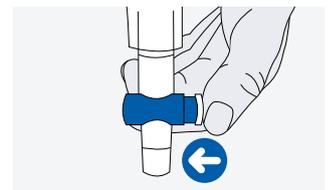


- Ouvrez la valve de vidange à fond pour vider la poche d'échange, puis veillez à la fermer et à la remettre correctement en place à la fin.
*Pour poche d'échange avec valve de drainage uniquement

Procédure de prélèvement d'urine

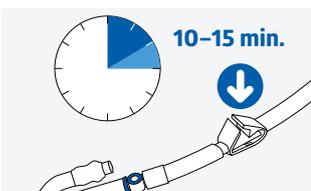


- Positionnez le clamp sur le tube, près du port de prélèvement sans aiguille.
- Avant le prélèvement, vérifiez que le clamp est bien fermé pendant 10 à 15 minutes
(ou jusqu'à ce que la quantité d'urine adéquate soit visible).

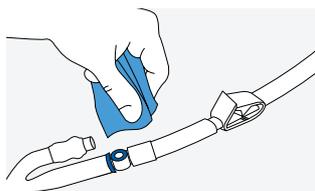

- Nettoyez le port de prélèvement sans aiguille en suivant le protocole de stérilité local.



- Insérez la pointe Luer de la seringue en entier pour prélever chaque échantillon.

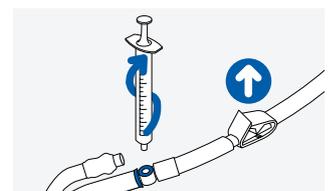


- Retirez la seringue après avoir prélevé l'échantillon et n'oubliez pas de rouvrir le clamp.

Systèmes de poches d'échange

Le système de mesure de la diurèse horaire UROSID® avec poche d'échange est disponible en deux versions différentes pour répondre à vos besoins spécifiques. Medline propose une variante du système de mesure de la diurèse avec une valve de drainage, qui permet aux praticiens de vider la poche d'échange à travers la valve. Pour la variante sans valve de vidange, il est nécessaire de remplacer la poche une fois qu'elle est pleine.

Comment ça marche ?

Après avoir mesuré l'urine recueillie dans la chambre, ouvrez le robinet situé sur le dessus de la chambre. Cela permettra à l'urine de s'écouler dans la poche d'échange placée en dessous.

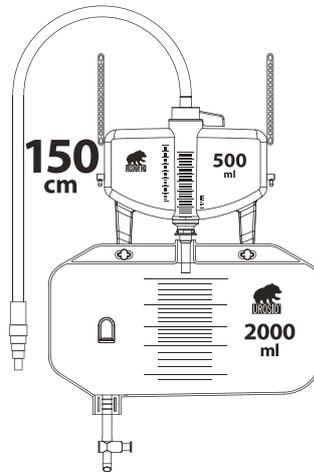

Système de mesure de la diurèse horaire avec poche d'échange UROSID® M5

REF 69050x-N

Référence	Volume de la poche (ml)	Volume du système de mesure de la diurèse (ml)	Longueur de tubulure (cm)	Caractéristique	Unités (ea)
690500-N	2 000	500	150	Avec valve croisée	10
690501-N	2 000	500	150	Sans valve de drainage	10

Poche d'échange pour système de mesure de la diurèse horaire UROSID® M5

REF 69050x-BAG

Référence	Volume de la poche (ml)	Caractéristique	Unités (ea)
690500-BAG	2 000	Avec valve croisée	50
690501-BAG	2 000	Sans valve de drainage	50



690500-N, 690501-N, 690500-BAG et 690501-BAG sont des dispositifs médicaux stériles de classe I avec fonction de mesure. Ces produits sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions d'usage sur l'étiquette correspondante.



Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans ce document.

© 2023 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1432_FR 12/2023.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez contacter votre responsable commercial ou visiter notre site Internet sur : www.medline.eu/fr