



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

WingGuard®

Dispositif de fixation de cathéter

**Convient aux
patients, au
personnel
soignant et, aux
peaux sensibles**



Avantages pour les soignants, les hôpitaux et les patients

- Extrêmement facile à appliquer et à retirer
- La taille universelle sécurise n'importe quelle taille ou type de cathéter PICC
- La faible épaisseur du dispositif minimise le risque de chocs et d'accrocs sur le site d'insertion
- Sa conception flexible épouse les contours du corps
- Adapté aux patients en terme de douceur, il reste en place pendant longtemps
- Disponible en matériau sans latex

WingGuard répond aux normes pour les dispositifs de fixation et de stabilisation de cathéters

Instructions d'application

Bien nettoyer et préparer le site. Nettoyer bien au-delà du site d'insertion selon le protocole de l'établissement pour assurer l'adhésion. Laissez sécher complètement (pendant au moins 30 secondes).


Remarque : Si la solution de préparation ne sèche pas complètement, l'intégrité et la sécurité de la fixation du Winguard peuvent être compromises. Un protecteur cutané peut être utilisé selon les préférences ou le protocole.

Faites glisser WingGuard sous le cathéter et centrez les ailettes du cathéter sur le WingGuard.

En maintenant le cathéter en place, tirez la languette centrale pour créer une ouverture dans la fente. Insérez la première ailette du cathéter dans l'ouverture.

Répétez de l'autre côté.

Retirez le protecteur, un côté à la fois, et collez WingGuard sur la peau. Appliquez votre pansement habituel sur le site d'insertion.

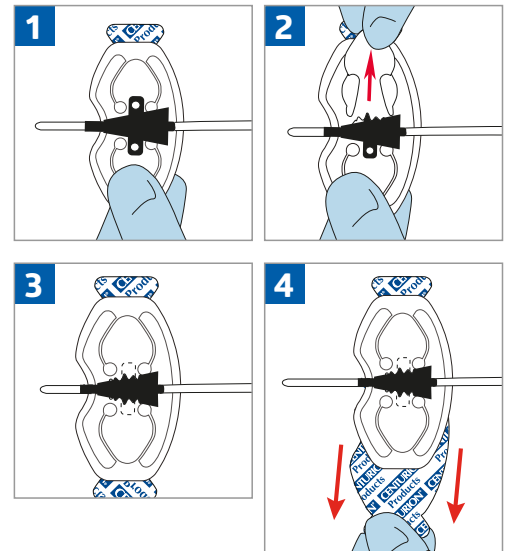


Instructions de retrait (non illustrées)

Retirez le pansement qui protège le site d'insertion.

Facultatif : Appliquez une bande adhésive stérile sur le cathéter pour aider à stabiliser le cathéter avant de retirer le WingGuard.

Tout en stabilisant le cathéter, tirez la languette centrale du WingGuard pour créer une ouverture afin de libérer les ailettes du cathéter du dispositif Winguard.

Découlez lentement WingGuard de la peau.

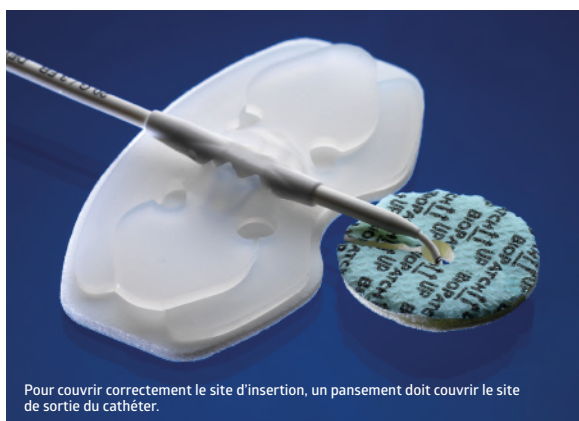

«Des produits adhésifs et des dispositifs de fixation améliorés... sont essentiels pour sécuriser le cathéter. Ces produits... peuvent réduire le délogement du cathéter et la nécessité de réinsertion avec le risque de blessure par piqûre d'aiguille associé ».

- De la fiche d'information de l'OSHA: Fixation des cathéters médicaux



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Les dispositifs de fixation WingGuard sont des dispositifs médicaux de classe I destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant toute utilisation, consultez les instructions et les précautions figurant sur l'étiquette correspondante.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. ML948_FR 05/2022

WingGuard® est une marque déposée de Centurion Medical Products Corporation. © 2022 Centurion Medical Products Corporation LIT088V3E



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

