



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

WingGuard®
Katheter fixatie

**Patiënt-vriendelijk,
verpleeg-vriendelijk,
kleding-vriendelijk**



Voordelen voor zorgverleners, ziekenhuizen en patiënten

- Zeer eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Het universele formaat beveiligd elke grootte of type PICC katheter
- Het low-profile ontwerp minimaliseert stoten en verdringen van de plek
- De buigbare constructie voegt zich comfortabel aan op lichaamscontouren
- De patiëntvriendelijke lijm is zacht, maar blijft intact bij langdurige dracht
- Verkrijgbaar in latexvrij materiaal

WingGuard voldoet aan de INS-normen voor het stabiliseren van katheters en vervaardigde stabilisatie apparaten

Toepassingsinstructies


Maak grondig schoon en bereid de gehele locatie goed voor volgens het protocol van de faciliteit, om naleving te garanderen. Laat het volledig drogen (gedurende ten minste 30 seconden). Notitie: Als de prep niet volledig is opgedroogd, kan dit de integriteit en veiligheid aantasten. Een huidbeschermers kan worden gebruikt naar voorkeur of protocol. Laat het gebied volledig drogen.

Schuif de WingGuard onder de katheter draaischijf en centreer de draaischijf over de WingGuard.

Houdt de katheter op zijn plaats, trek de tab uit het midden om een opening in de gleuf te creëren. Steek de eerste katheter vleugel in de gleuf.

Herhaal dit aan de andere zijde.

Verwijder de voering met één kant tegelijkertijd en bevestig de WingGuard op de huid. Gebruik uw gewenste verband voor de specifieke locatie.

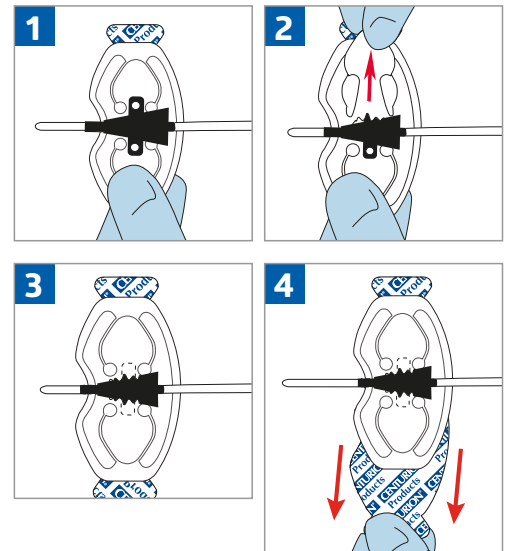

Verwijderinstructies (niet zichtbaar)

Verwijder het verband.

Optioneel: Breng een steriele tape strip aan op het katheterbuisje om zo de katheter te stabiliseren alvorens u de WingGuard verwijdert.

Terwijl u de katheter stabiliseert, trekt u de WingGuard tab uit het midden om zo een opening in de gleuf te creëren, en zo de draaischijfvleugels van het apparaat los te kunnen maken.

Trek de WingGuard langzaam van de huid, weg van de uitgangsplek.



Om de wond goed te verzorgen, moet een verband de katheter bedekken.

'Verbeterde lijmproducten en fixatie-apparaten... zijn essentieel voor een verhoogde katheter stabiliteit. Dergelijke producten... kunnen het risico van het losraken van de katheter en de noodzaak van het terugplaatsen met de bijbehorende naald verminderen.'

- Uit de OSHA FactSheet: het veiligstellen van medische katheters



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

WingGuard-fixatiehulpmiddelen zijn medische hulpmiddelen van klasse I die bedoeld zijn voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Raadpleeg voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de bijbehorende etikettering.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML948_NL 04/2022

WingGuard® is een gedeponeerd handelsmerk van Centurion Medical Products Corporation. © 2022 Centurion Medical Products Corporation LIT088V3E



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

