



Medline International Germany GmbH

Medline Strasse 1-3
47533 Kleve, Germany
Tel : +49 (0)2821-7510-0
Fax: +49 (0)2821-7510-7802

www.medline.com/de



ORLVC

OR12LTR

Technisches Datenblatt

MED-RIGID Sammelbehälter für große Flüssigkeitsmengen

Artikelnummer(n)

ORLVC - OR12LTR

Beschreibung

Der MED-RIGID ORLVC ist ein großer Einwegbehälter. Der Behälter sammelt mehr als 10 Liter Flüssigkeit während eines operativen Eingriffes.

Der passende Rollständer OR12LTR ist wiederverwendbar und wird mit dem Sammelbehälter ORLVC verwendet.

MED-RIGID Sammelbehälter besteht aus:

- Einem starren, transparenten Behälter mit einer Graduierung, welche die Füllmenge anzeigt. (Der weiße vertikale Streifen dient zur Beschriftung von Patienteninformationen)
- Einem gewölbten, blauen Deckel für eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Kollaps und zur Vermeidung von Undichtigkeiten. Der Deckel ist mit 4 Clips zur sicheren Befestigung am Behälter versehen.

Der blaue Deckel hat 4 unterschiedlich große Anschlüsse, die jeweils mit Verschlussklappen versehen sind:

1. **VAKUUM-ANSCHLUSS:** zum Anschluss der Vakuumverbindung mittels rotem Vakuumschlauch. Zum Schutz der Vakuumquelle vor Kontamination ist jeder MED-RIGID Deckel mit einem PPV-Filter (Porous Plastic Valve) ausgestattet, einer hydrophoben Filter-/Ventileinheit, die Aerosole filtert und das Vakuum stoppt, sobald ein Kontakt des Deckels mit Flüssigkeit auftritt.
2. **PATIENTEN-ANSCHLUSS:** Zum Anschluss des Patientenschlauchs. Der Patientenanschluss ist mit einem abnehmbaren 90° Winkel-Steckverbinder ausgestattet. Er hilft, ein Abknicken des Patientenschlauches zu vermeiden und kann bei Bedarf abgenommen werden.
3. **ORTHO-ANSCHLUSS:** Ermöglicht die Verbindung mehrerer MED-RIGID Sammelbehälter mittels Tandemschlauch (Artikelnummer: OR542) bei chirurgischen Eingriffen mit hohem Flüssigkeitsaufkommen.
4. **ZUBEHÖR (ACCESSORY)-ANSCHLUSS:** Der größte Anschluss des Deckels. Er ermöglicht den Anschluss von Zubehör wie z.B. Gewebeauffangsocken (Artikelnummer: OR123 / OR124 / OR125) oder die Zugabe von MED-GEL Geliermittel (Artikelnummer: RE2015) am Ende der Absaugung für eine sichere Entsorgung.

Basismaterialien

MED-RIGID Sammelbehälter Transparenter Behälter (PP : Polypropylen), Blauer Deckel und Anschlüsse (PP) - PPV Filter (Niedrigdruckpolyethylene: UHMW-PE) - L-Konnektor (PP) - Verschlussklappen (LDPE)

Revision: 3

Dokument Titel: FINT.441 - Technical sheet

Dokumentnummer: EUJ-00004-F-00025

Rollständer: Metall

Packungseinheit

ORLVC: 4 Einheiten/Karton

OR12LTR: 1 Stck./Karton

Sterilisation

Nicht steril

Hersteller

ORLVC: Medline Industries Inc. Northfield, IL 60093, USA

EN ISO 13485

OR12LTR : Medline International France SAS

EN ISO 13485

Qualitätsrichtlinien

ORLVC: Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 2017/745

MPG Klasse I nicht-steril

OR12LTR : Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 2017/745

MPG Klasse: *I Nicht steril*

Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.



ORLVC



© 2020 Medline Industries Inc. oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten.
TDS_MED RIGID_ORLVC-DE03