



Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



ORLVC

OR12LTR



Ficha técnica

MED-RIGID Recipiente para recogida de grandes volúmenes

Referencia(s)

ORLVC - OR12LTR

Descripción

MED-RIGID es un recipiente para grandes volúmenes de un solo uso. Se usa para recoger más de 10 litros de fluidos durante las cirugías.


El soporte/carro giratorio con ruedas es un equipamiento reutilizable. Usado con ORLVC para facilitar la movilidad.

El recipiente MED-RIGID está compuesto de:

- Un recipiente transparente graduado correspondiente al volumen de los fluidos recogidos. (La gruesa línea blanca vertical sirve para escribir información del paciente),
- Tapa azul abovedada para una mayor resistencia a la presión (para evitar las fugas). La tapa está construida con 4 pestañas seguras ("clips") para evitar la desconexión del recipiente rígido durante la aspiración o la eliminación.

La tapa tiene 4 puertos de diferentes diámetros y sus tapones asociados:

1. **PUERTO DE VACÍO:** Permite la conexión del tubo de vacío rojo de la fuente de vacío. Para proteger la fuente de vacío de la contaminación, cada tapa azul del MED-RIGID está fabricada con una PPV (válvula polimérica porosa), un filtro hidrofóbico que filtra los aerosoles y bloquea definitivamente la aspiración cuando entra en contacto con líquidos.
2. **PUERTO DEL PACIENTE:** Permite la conexión del tubo del paciente. El puerto del paciente está equipado con un conector acodado (90°). Se puede quitar o utilizar para facilitar la conexión y evitar el acodamiento del tubo del paciente.
3. **PUERTO ORTHO:** permite su conexión en tándem usando tubos tándem (ref.: OR542) con otro recipiente de aspiración MED-RIGID para recoger mayores volúmenes de fluidos durante cirugías específicas.
4. **PUERTO PARA ACCESORIOS:** Es el puerto más grande de la tapa. Permite la conexión de accesorios como los accesorios para la toma de muestras (ref.: OR123 / OR124 / OR125) o introducir sobres MED-GEL (ref.: RE2015 – agente gelificante) al final del procedimiento para una eliminación segura.

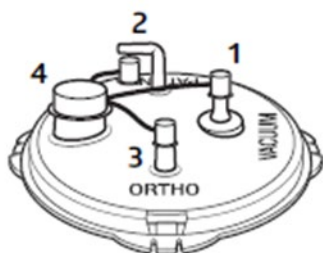

Materiales principales

Recipiente MED-RIGID: Recipiente transparente (PP: polipropileno) - Tapa azul y puertos conectores (PP) - filtro PPV (polietileno de alta densidad: uhmw-pe con polímero natural) – conector en L (PP) – Tapón (LDPE)

	Soporte giratorio: Metal
Cantidad por caja	ORLVC: 4 unidades por caja OR12LTR: 1 unidad por caja
Esterilización	No estéril
Fabricante	ORLVC: Medline Industries, Inc. Northfield, IL 60093 EE. UU. EN ISO 13485 OR12LTR: Medline International France SAS EN ISO 13485
Normativa	ORLVC: De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios Clase: I no estéril. OR12LTR: De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios Clase: I no estéril Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.



ORLVC



© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_MED RIGID_ORLVC-ES03