



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43
www.medline.eu.fr



ORLVC

OR12LTR



Fiche technique

MED-RIGID Bocal collecteur de large volume

Référence(s)

ORLVC - OR12LTR


Description

MED-RIGID est un bocal rigide et à usage unique pour la collection de fluides de plus de 10 litres pendant la chirurgie.

Le support mobile est un équipement réutilisable à utiliser avec ORLVC pour une mobilité facile

Le bocal d'aspiration MED-RIGID est composé de:

- D'un récipient opaque doté d'une graduation correspondant aux volumes de fluides collectés. (La bande blanche verticale permet d'écrire les informations liées au patient),
- D'un couvercle bleu bombé pour une meilleure résistance à la dépression (éviter les fuites) Il est doté de 4 systèmes de fermeture inviolables (dits « clips ») empêchant une fois adaptés sur le récipient de se désolidariser pendant l'aspiration ou l'évacuation.

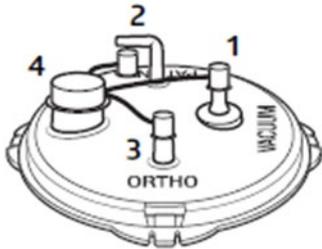

Le couvercle est composé de 4 sites de connexion de diamètres différents (détrompeurs) et leurs couvercles hermétiques correspondants sont inclus

1. **LE SITE DE VIDE VACUUM:** permet la connexion de la tubulure d'acheminement du vide pour la mise sous dépression. Le site VACUUM est protégé par un filtre PPV (Porous Plastic Valve), un filtre hydrophobique permettant de filtrer les aérosols et bloque définitivement l'aspiration une fois en contact avec les liquides
2. **LE SITE PATIENT:** permet la connexion de la tubulure patient. Le site patient est muni d'un connecteur « en L » opaque coudé à 90°C et amovible. Il peut être retiré ou utilisé pour faciliter la connexion et éviter une plicature de la tubulure patient.
3. **LE SITE ORTHO:** permet la connexion de la tubulure tandem (réf : OR542) avec un autre bocal MED-RIGID pour la collecte de volumes de liquides plus conséquents.
4. **LE SITE ACCESSOIRE:** Est le plus large des sites de connexion sur le couvercle. Il permet l'utilisation d'accessoires tels que les chaussettes de prélèvement IVG (réf : OR123/OR124/OR125) ou l'ajout de doses de gélifiants de MED-GEL (réf : RE2015) en fin de procédure pour une évacuation des déchets sécurisée.

Matière(s)

Bocal MED-RIGID: Récipient transparent (PP : polypropylène) - Couvercle bleu et sites de connexion (PP) - filtre PPV (polyéthylène de haute densité: uhmw-pe avec polymère naturel) - connecteur en L (PP) - bouchons (LDPE)

Pied Mobile: Métal

Conditionnement

ORLVC: 4 unités par carton

OR12LTR: 1 unité par carton

Emballage

Non stérile

Fabricant

ORLVC : Medline Industries, Inc. Northfield, IL 60093 USA.

EN ISO 13485

OR12LTR : Medline International France SAS

EN ISO 13485

Règlementation

ORLVC: Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux (UE) 2017/745

Classe du dispositif : I non stérile

OR12LTR : Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux (UE) 2017/745

Classe du dispositif: I non stérile

Veillez consulter l'étiquette et le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

