



Medline International Netherlands B.V.  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)



ORLVC

OR12LTR

## Technische gegevens

## MED-RIGID Groot volume opvangpot

### Referentie(s)

### ORLVC - OR12LTR

### Omschrijving


De MED-RIGID is een opvangpot met groot volume voor éénmalig gebruik. Gebruikt om meer dan 10 liter vloeistof op te vangen tijdens een ingreep.

De rollende standaard is herbruikbare apparatuur. Gebruik samen met ORLVC voor mobiliteit.

MED-RIGID opvangpot bestaat uit:

- Een transparante opvangpot met maataanduiding om het volume van de opgevangen vloeistof aan te geven. (De verticale brede witte strip kan gebruikt worden om patiëntgegevens op te schrijven),
- Een bolle blauwe deksel voor betere weerstand tegen depressies (om lekkage te voorkomen). Het deksel is gebouwd met 4 lipjes („clips“) om losraken van de canister tijdens afzuiging of afvoeren te voorkomen.

De deksel heeft 4 poorten met verschillende diameters en bijbehorende doppen:

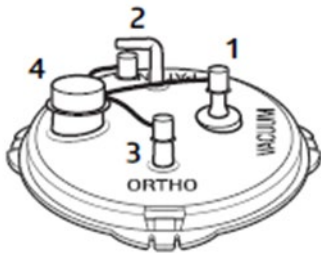

1. **VACUÛMPOORT:** Hier wordt de rode slang van de vacuÛmbron aan verbonden. Om de vacuÛmbron te beschermen tegen besmetting, is elke MED-RIGID blauwe deksel uitgerust met PPV (Poreus Plastic Ventiel), een hydrofobe filter die aerosolen filtert en afzuiging blokkeert wanneer deze in aanraking komt met vloeistof.
2. **PATIËNTPOORT:** Hier wordt de patiëntslang aan verbonden. De patiëntpoort heeft een 90° elleboog verbindingstuk. Deze kan verwijderd worden of gebruikt worden om knikken in de patiëntslang te voorkomen.
3. **ORTHO POORT:** Hier kan een tandemslang (ref: OR542) aan bevestigd worden met nog een MED-RIGID aspiratiecanister om een nog groter volume op te kunnen vangen tijdens specifieke ingrepen.
4. **ACCESSOIREPOORT:** Dit is de grootste poort op het deksel. Hier kunnen accessoires aan bevestigd worden zoals een weefselafnamekous (ref: OR123 / OR124 / OR125) of om aan het eind van de procedure MED-GEL (ref: RE2014 - stollingsmiddel) toe te voegen om de vloeistof veilig af te voeren.

### Belangrijkste materialen

**MED-RIGID opvangpot:** Transparante opvangpot (PP : polypropyleen) - Blauw deksel & verbindingspoorten (PP) - PPV filter (high density polyethyleen : uhmw-pe met natuurlijk polymeer) - L-verbindingstuk (PP) - Dop (LDPE)

**Rolstandaard:** Metaal

<b>Verpakkingseenheid</b>	<b>ORLVC:</b> 4 stuks per doos <b>OR12LTR</b> 1 stuk per doos
<b>Sterilisatie</b>	Niet steriel
<b>Fabrikant</b>	<b>ORLVC:</b> Medline Industries, Inc Northfield, IL 60093, USA EN ISO 13485 <b>OR12LTR:</b> Medline International France SAS EN ISO 13485
<b>Regelgeving</b>	<b>ORLVC:</b> In overeenstemming met Medische Hulpmiddelen Richtlijn 2017/745 MHR Klasse: I niet steriel. <b>OR12LTR:</b> In overeenstemming met Medische Hulpmiddelen Richtlijn 2017/745 MH Klasse: I niet steriel Raadpleeg de volledige labels en gebruikersaanwijzing voordat u het product gebruikt.



ORLVC

© 2020 Medline Industries Inc. of één van haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.  
TDS\_MED RIGID\_ORLVC-NL03