



Medline International Portugal Unipessoal LDA  
Avenida do Brasil, 43 3º Dto  
1700-062 Lisboa

Tel: +351 808 29 19 21  
Fax: +351 808 29 19 22  
[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



ORLVC

OR12LTR



## Ficha técnica

## MED-RIGID Recipiente de aspiração de grande volume

### Referência(s)

ORLVC - OR12LTR

### Descrição

O MED-RIGID é um recipiente de grande volume de utilização única. É usado para recolher mais de 10 litros de fluidos durante a cirurgia.


O suporte com rodas é um equipamento reutilizável. Usado com o ORLVC para facilitar a mobilidade.

O recipiente MED-RIGID é composto pelo seguinte:

- Um recipiente transparente com graduação correspondente ao volume de fluidos recolhidos. (A faixa branca vertical é para escrever informações do paciente),
- Tampa abobadada azul para uma melhor resistência contra depressões (para evitar fugas). A tampa é construída com 4 abas antimanipulação («clipes») para evitar desligar o recipiente rígido durante a aspiração ou eliminação.

A tampa tem 4 portas de diferentes diâmetros e respetivos tampões:

1. **PORTA DE VÁCUO:** Permite a ligação do tubo de vácuo vermelho a partir da fonte de vácuo. Para proteger a fonte de vácuo contra a contaminação, cada tampa azul MED-RIGID é construída com PPV (Válvula Plástica Porosa), um filtro hidrofóbico que filtra aerossóis e que impede definitivamente a aspiração quando em contacto com líquidos.
2. **PORTA DO PACIENTE:** Permite a ligação de tubagem do paciente. A porta do paciente está equipada com um conector de cotovelo a 90°. Pode ser removido ou utilizado para facilitar a ligação e evitar torcer a tubagem do paciente.
3. **PORTA ORTO:** permite a ligação de tubagem em tandem (ref: OR542) com um outro recipiente de aspiração MED-RIGID para um maior volume de recolha de fluidos durante cirurgias específicas.
4. **PORTA DE ACESSÓRIOS:** É a maior porta da tampa. Permite ligar acessórios como por exemplo bolsas de amostragem (ref: OR123 / OR124 / OR125) ou acrescentar MED-GEL (ref: RE2015 - agente de gelificação) no final do procedimento para uma eliminação segura.

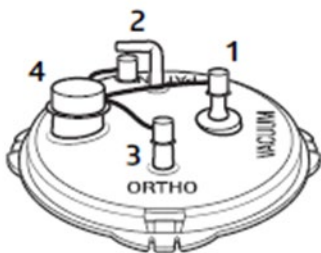

### Materiais principais

**Recipiente MED-RIGID:** Recipiente transparente (PP: polipropileno) - Tampa azul e portas de ligação (PP) - Filtro PPV (polietileno de alta densidade: UHMW-PE com polímero natural) - conector L- (PP) - Tampa (LDPE)

**Suporte com rodas:** Metal

### Quantidade por caixa

**ORLVC:** 4 unidades por caixa

**OR12LTR:** 1 unidade por caixa

---

**Esterilização**Não estéril

---

**Fabricante**

**ORLVC:** Medline Industries, Inc. Northfield, IL 60093, EUA.  
EN ISO 13485  
**OR12LTR:** Medline International France SAS  
EN ISO 13485

---

**Normativa**

**ORLVC:** De acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos  
Classe: I não estéril.  
**OR12LTR:** De acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos  
Classe: I Não Estéril  
Consulte a rotulagem e as instruções de utilização na íntegra antes de usar o produto.

---



ORLVC

© 2020 Medline Industries Inc. ou uma das suas filiais. Todos os direitos reservados.  
TDS\_MED RIGID\_ORLVC-PT03