

Come indossare le mascherine procedurali

Si raccomanda di cambiare mascherina ogni 3 ore



1 Lavare/pulire le mani



2 Accertarsi che la stampa Medline sia rivolta verso l'esterno e che la barretta conformabile sia in alto



3 Posizionare gli elastici dietro alle orecchie e coprirli con il cappellino/cuffietta.



4 Modellare la barretta in base alla forma del naso



5 Assicurarsi che la mascherina sia stata completamente aperta ed estesa così da coprire naso e bocca




6 In caso di rischio di schizzi, si utilizzi apposite protezioni per gli occhi



7 Dopo l'utilizzo, rimuovere la mascherina e smaltirla immediatamente



8 Smaltire correttamente la mascherina

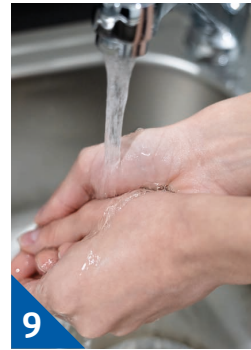

9 Lavarsi le mani dopo aver smaltito la mascherina

Per saperne di più sulle mascherine chirurgiche, contattate il vostro account manager Medline o visitate www.medline.eu/it

