

# Come indossare le mascherine respiratorie

Tutte le mascherine respiratorie devono svolgere il FIT test in conformità con le poltiche locali. Cambiare la mascherina se contaminata o ogni 8 ore.



1 Lavare/pulire le mani



2 Assicurarsi che la barretta metallica si trovi in alto sul naso e i lacci nella parte posteriore.



3 Mantenere la mascherina respiratoria sulla bocca ed il naso.



4 Posizionare gli elastici superiori all'altezza della nuca



5 Posizionare gli elastici inferiori all'altezza del collo.



6 Modellare la barretta metallica in base alla forma del naso



7 Mettere entrambe le mani sul respiratore mantenendo la giusta posizione e inspirare con forza. Se fuoriesce dell'aria dai bordi, riposizionare la mascherina in modo corretto.



8 In caso di rischio di schizzi, si utilizzi apposite protezioni per gli occhi



9 Dopo l'utilizzo, rimuovere la mascherina e smaltirla correttamente.



10 Lavarsi le mani dopo aver smaltito la mascherina

Per saperne di più sulle mascherine chirurgiche, contattate il vostro account manager Medline o visitate [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)