

Forma de aplicação: Respiradores

Todos os respiradores devem ser testados quanto à sua vedação de acordo com a política local. Trocar a máscara caso fique contaminada ou trocá-la a cada 8 horas.



1

Lavar/limpar as mãos



2

Garantir que a tira de metal fica para cima e os elásticos para baixo



3

Segure na máscara sobre a boca e o nariz



4

Colocar o elástico superior na parte de cima da cabeça



5

Colocar o elástico inferior na base do pescoço



6

Adaptar o clipe metálico à cana do nariz



7

Faça uma concha com as mãos e coloque-as por cima da máscara respiratória sem perturbar a posição e inspire vigorosamente. Se detetar fugas, reajuste a máscara.



8

Se existir risco de salpicos, utilizar óculos de proteção adequados



9

Após a utilização, retirar a máscara e eliminá-la corretamente



10

Lavar as mãos depois de eliminar a máscara

Para saber mais sobre máscaras de respirador, entre em contato com o gerente de contas da Medline ou visite www.medline.eu/pt