

Instrucciones de uso: Mascarillas quirúrgicas

Se recomienda cambiar la mascarilla cada 3 horas de uso continuado



1 Lávese las manos



2 Asegúrese de que el logo de Medline queda hacia fuera y la banda moldeable hacia arriba



3 Ajuste la banda al puente de su nariz



4 Átese la tira superior en la coronilla



5 Átese la tira inferior en la base del cuello



6 Asegúrese de que los pliegues están totalmente abiertos y cubren nariz y boca



7 Si existe riesgo de salpicaduras, utilice la protección ocular adecuada



8 Después de su uso, retire la mascarilla rompiendo las tiras. No deje que la mascarilla toque su cuello



9 Deseche la mascarilla adecuadamente



10 Lávese las manos una vez desechada la mascarilla

Para obtener más información sobre mascarillas quirúrgicas, póngase en contacto con su representante comercial de Medline o visite www.medline.eu/es